

PRESTATIONS DE SOINS

2023



Autonomie

Changez-vous la vie !



CHANGEZ-VOUS LA VIE !



Sim Santé, Prestataire médical depuis plus de 20 ans

Mobilier, Maintien à Domicile



04 69 84 22 90

Prestations de soins



04 69 84 22 95

Aide au quotidien



04 69 84 22 90

Soins, hygiène & incontinence



04 37 64 47 53

SIM SANTE est un prestataire médical, distributeur de **matériel lié aux soins** à domicile, qui accompagne ses clients dans la recherche d'autonomie depuis plus de 20 ans.

Nous proposons du matériel de maintien à domicile (lit, fauteuil, aide à la toilette, etc.) **à la vente ou à la location**, la dispensation de matériel de soin, d'hygiène et d'incontinence ainsi que des prestations globales de soins techniques. Ces prestations sont destinées aux particuliers, aux professionnels de santé et organismes de soins : SSIAD, HAD, Infirmiers libéraux...

SOMMAIRE

Nutrition

.....
p.4-9



Stomathérapie

.....
p.10-23



Urologie

.....
p.24-35



PRESTATION DE NUTRITION



S'appuyant sur des décennies d'innovation et d'engagement, Nestlé Health Science a été fondé en 2011 par des équipes passionnées par la nutrition qui s'adaptent en permanence pour répondre aux besoins nutritionnels de tous. Nestlé propose une alimentation adaptée à tous les âges : personnes qui ont besoin d'une alimentation spéciale liée à certaines pathologies.



Les produits NUTRICIA, sont destinés à satisfaire les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition et pallier certains déficits nutritionnels et métaboliques. Les produits sont prescrits par les professionnels de santé.



FRESENIUS KABI est une entreprise qui possède des produits pour la nutrition parentérale et la nutrition entérale. La nutrition clinique est destinée à des patients qui ne peuvent pas s'alimenter normalement ou qui s'alimentent mais de manière insuffisante.

ARTIFICIELLE ENTÉRALE

Une diététicienne vous accompagne tout au long de votre prise en charge nutritionnelle. **Elle peut assurer une formation sur le matériel et son utilisation.**

Elle fait **le lien entre vous et vos soignants** (infirmier, médecin traitant et/ ou médecin hospitalier) afin d'adapter votre nutrition à vos besoins. Tout changement nécessaire pourra faire l'objet d'une nouvelle ordonnance. La diététicienne sera alors **en coordination avec votre médecin référent** et enclenchera une nouvelle livraison.

Entre chaque évaluation diététique, **SIM SANTE assure une astreinte 24h/24, 7j/7 sur la nutrition et le matériel.**



Nos atouts



Livraison sous
24h-48h



Astreinte
24h/24 7j/7

1 LA DEMANDE ET LA PRESCRIPTION

Par le **médecin** traitant ou hospitalier. Le médecin traitant reste le **médecin référent** du patient durant son traitement et devra renouveler les prescriptions.

2 CONSTITUION DU DOSSIER

À la réception de l'ordonnance, nous préparons votre dossier administratif.

PREMIER CONTACT

Échange avec la diététicienne sur la prise en charge. Une première livraison globale est livrée pour 15 jours : elle contient la nutrition et le matériel nécessaire à votre prise en charge. La diététicienne **est en lien avec votre infirmer libéral.**

NOUVEAUTÉ

Kit COMPAT CURAE

Une gamme complète de sets de soins sur mesure pour faciliter la prise en charge des patients sous nutrition entérale à domicile.



NOS +

Gamme de compléments alimentaires et épaississant

Large gamme professionnelle de produits de Nutrition : Nestlé, Nutricia et Fresenius.



3 J+3 LE SUIVI

La diététicienne prend contact avec vous à **J+3 pour réaliser un point sur la prestation et s'assurer que tout va bien.**

4 J+14 LE PREMIER BILAN

La diététicienne vient à **domicile pour évaluer votre état** nutritionnel, échanger et répondre aux questions que vous vous posez. **Un compte rendu est réalisé et envoyé à votre médecin référent.**

LIVRAISON

Par la suite, la livraison globale est effectuée tous les mois.

5 J+28 LE SUIVI DIETETIQUE

La diététicienne **réalise des visites à domicile tous les 3 mois pour la première année, puis tous les 6 mois.** Elle sollicite les médecins traitants et infirmiers libéraux si la nutrition nécessite des ajustements. **Un compte rendu diététique est envoyé au médecin à chacun de ses passages.**

NOTRE GAMME D'AIDE

Manger seul nécessite des capacités qui peuvent être altérées avec le temps ou par une maladie. Les ustensiles sont là pour permettre de faciliter ou d'assurer la prise alimentaire et hydrique, maintenir une autonomie et de prévenir des complications.

C'est pourquoi nous proposons une gamme variée d'ustensiles afin de permettre de maintenir une sérénité autour du repas et de s'adapter aux besoins de la personne aidée.

Des conseils et un accompagnement au choix peuvent être prodigués par des professionnels.

 IDENTITÉS	Référence
	<p align="center">Rebord d'assiette incurvé</p> <p>Facilite la prise des aliments en créant un rebord à l'assiette et en limitant sa taille. S'adapte à toutes les assiettes de diamètre 23 à 28.</p> <p align="right">AR100002</p>
	<p align="center">Tasse ergo avec son couvercle à bec</p> <p>Elle est évasée pour diminuer les mouvements de la tête et une grande anse pour faciliter la préhension. Contenance : 30 cl, diamètre bas : 5,5cm et hauteur 10 cm.</p> <p align="right">Tasse Ergo AR100013V</p> <p align="right">Couvercle à bec AR100005</p>
	<p align="center">Verre à découpe nasale</p> <p>Le verre à découpe nasale Ergo permet de boire sans bouger la tête et en limitant les mouvements. Contenance 27 cl. Hauteur 12,5 cm. Dimètre 5,5 * 8,5 cm. Existe en coloris : vert, bleu et transparent.</p> <p align="right">Coloris vert AR100001V Coloris bleu AR100001B Coloris transparent AR100001BO</p>

TECHNIQUE À L'ALIMENTATION

	<p style="text-align: center;">Tasse Handycup</p> <p>La tasse Handycup est munie de larges anses très faciles à prendre. Sa forme inclinée a été étudiée pour limiter les efforts liées aux mouvements de besucement des avant-bras. Tasse transparente graduée jusqu'à 20 cl. Hauteur : 95 mm. Poids 132 gr.</p>	<p style="text-align: right;">AR100006</p>
	<p style="text-align: center;">Couvert TORSOGRIP</p> <p>La gamme de couvert TORSOGRIP permet de prendre un repas en tenant l'ustensile plus facilement. Chaque ustensile est composé d'un manche large en caoutchou pour permettre une préhension plus facile. Le couvert peut se tordre pour trouver l'angle adapté.</p>	<p>Petite Cuillère AR100007CC Cuillère à soupe AR100007CS Couteau AR100007C Fourchette AR100007F</p>
	<p style="text-align: center;">Lot de 6 tubes mousse</p> <p>Lot de 6 tubes mousse qui s'adaptent sur tous les ustensiles pour en grossir le manche et faciliter leur préhension.</p>	<p style="text-align: right;">AR100007</p>
	<p style="text-align: center;">Tapis antidérapant</p> <p>Facilite la préhension des objets (vaisselle, pilulier, livre, téléphone, télécommande, etc.). Il existe soit le pad rond diamètre 20 cm, soit le pad rectangulaire 40 X 28 cm.</p>	<p>Rond orange AR100008RO/O Rond transparent AR100008RO/T Rectangulaire orange AR100008RE/O Rectangulaire transparent AR100008RE/T</p>

LA STOMATHERAPIE



L'activité de Coloplast comprend le soin des stomies, le soin de l'incontinence, le soin des plaies et de la peau et les soins en urologie.

La mission de Coloplast est de faciliter la vie des personnes qui souffrent d'altérations physiques intimes. Cela exige à la fois une compréhension de leurs défis médicaux et des nombreuses autres préoccupations qui impactent leur vie.



Hollister propose des produits médicaux dans le domaine de la stomathérapie, des soins de la continence et des soins des plaies.

Depuis plus de 95 ans, la société est au service des professionnels de santé et des utilisateurs en essayant de faire la différence dans le parcours de vie des personnes du monde entier.

Hollister est une société qui se consacre à satisfaire les besoins des personnes qui utilisent leurs produits et des personnes qui les accompagnent.

Teleflex®

Teleflex est un fournisseur mondial de technologies médicales conçues pour améliorer la santé et la qualité de vie. Leurs innovations sont guidées par des objectifs précis, chercher constamment à identifier les besoins cliniques encore non satisfaits, pour le bien des patients et des professionnels de santé.

B | BRAUN

B. Braun développe, produit et distribue des solutions dans les domaines de la chirurgie, la perfusion, les soins intensifs, l'anesthésie et les soins associés aux pathologies chroniques.

Les 2 000 collaborateurs contribuent chaque jour à l'amélioration de la qualité de vie des patients, en s'appuyant sur les valeurs fondatrices, le partage des expertises, des connaissances, des savoir-faire...

Nos atouts



Livraison nationale
sous **24h-48h**



Astreinte
24h/24 7j/7

Une infirmière et une diététicienne sont là **pour vous accompagner tout au long de votre prise en charge**. Elles prendront **contact avec vous tous les 3 mois afin de s'assurer que tout va bien**. Elles feront le lien entre vous et vos soignants (infirmier, médecin traitant et/ou hospitalier) si nécessaire. Tout changement pourra faire l'objet d'une nouvelle ordonnance. Dans ces cas SIM SANTE sera alors en coordination avec votre médecin référent et enclenchera une nouvelle livraison.



QU'EST CE QU'UNE STOMIE ?

Une stomie fait suite à une intervention chirurgicale, digestive ou urinaire qui vise à traiter une maladie et à en soulager les symptômes. Une stomie c'est l'abouchement de la peau à l'abdomen ou à une partie de l'intestin ou à l'urètre, ce qui va permettre l'évacuation des selles et des gaz ou des urines.

Elle peut être permanente ou temporaire. La chirurgie peut être réalisée afin de permettre une meilleure cicatrisation suite à une inflammation ou une infection pour une période temporaire.

Il existe deux types de stomies :

- ❖ les stomies digestives (intestinales) : les colostomies (formées à partir du côlon) et les iléostomies (formées à partir de l'intestin grêle).
- ❖ les stomies urinaires (urostomies) c'est la dérivation des voies urinaires à la paroi abdominale.

Pour plus d'information :

Coloplast.fr
siteiasdulyonnais.fr

NOS RECOMMANDATIONS

Les soins de stomies sont des soins propres et non stériles. Les soins se font avec de l'eau du robinet.

Il est préférable de changer la poche et/ou le socle à distance des repas.

Lors du soins, il est important d'observer la forme et la couleur de la stomie, observer la peau autour de la stomie. En cas d'irritation, de blessure, nous contacter, une infirmière pourra vous conseiller.



L'utilisation des antiseptiques est interdit, ils peuvent provoquer des lésions de la peau.

Fréquence de changement socles et poches :

Colostomie et iléostomie :

système 1 pièce : changement 1 à 2 fois par jour

Système 2 pièces : changement du support tous les 3 jours et changement de la poche 1 à 2 fois par jour

Stomie urinaire :

Système 1 pièce : changement 1 fois par jour

Système 2 pièces : changement du support tous les 2 jours et changement de la poche tous les jours

QUELQUES CONSEILS

En cas de diarrhées :

- ❖ Stopper l'apport en fibres dans vos repas (fruits et légumes) le temps que le transit se régule.
- ❖ Manger un peu plus salé que d'habitude pour retenir l'eau et ainsi limiter les diarrhées mais aussi pour compenser les pertes due aux selles.
- ❖ Boire au moins 1.5 L de liquide par jour pour compenser l'eau perdues dans les selles.

En cas de constipation :

- ❖ Boire au moins 1.5 L de liquide par jour. Favoriser l'eau HEPAR.
- ❖ Manger : des pruneaux, jus de pruneaux.
- ❖ Augmenter l'apport en fibre (légumes et fruits)
- ❖ Éviter la consommation de banane, riz, carotte.

En cas de brûlure péristomiale :




- ❖ Vérifier le verso du socle pour détecter une éventuelle fuite.
- ❖ Adapter la découpe du socle.
- ❖ Appliquer la poudre et retirer l'excédent, effectuer un joint d'étanchéité à l'aide de la pâte ou d'un anneau.

Si le problème persiste, n'hésitez pas à en parler à votre infirmière libérale ou à nous contacter pour plus de conseil.

LES POCHEs

LES POCHEs FERMEEs



Coloplast		50	70
	Sensura Mio Flex 2 pièces fermées Système de couplage adhésif souple. Boîte de 30	Textile Maxi (460 ml)	Réf : 122139 Réf : 122229
		Transparent Maxi (460 ml)	Réf : 122169 Réf : 122239


Hollister		Référence	Ø pré-découpage
	CERAPLUS Convexe souple avec renforts adhésifs. Poches vidables. Opaque avec fenêtre de vision. Boîte de 30	64100	 15-38 mm
		64101	 15-55 mm



LES POCHEs HAUT DEBIT

Coloplast		60	70
	Sensura Mio Click 2 pièces Haut débit Boîte de 10	Textile Maxi (1040 ml)	Réf : 186020 Réf : 186030

LES POUCHES VIDABLES





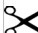

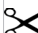
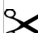
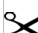
Coloplast			60	70
	Sensura Mio Click 2 pièces vidables Système de couplage mécanique avec clic de fermeture Boîte de 30	Textile Maxi (510 ml)	Réf : 114529	Réf : 114569
		Transparent Maxi (510 ml)	Réf : 114539	Réf : 114579
			✂ 10-55	✂ 40-45
	Sensura Mio 1 pièce vidable Boîte de 30	Textile Maxi (550 ml)	Réf : 104519	Réf : 104549



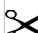
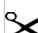

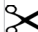

B BRAUN		Référence
	Flow collector Poche de recueil à distance pour selles liquides Boîte de 15	039900C

B BRAUN			55	65
	Flexima 3S Vidable Roll'up	635 ml	Réf : 932055FR	
	Poche de stomie vidable avec clamp intégré pour couplage mécanique avec anneau flottant.	785 ml	Réf : 932455FR	
	Boîte de 30	755 ml		Réf: 932465FR
	Flexima 3S Haut débit	970 ml	Réf : 933055FR	
	Poche de stomie vidable avec bouchon pour couplage mécanique avec anneau flottant.	940 ml		Réf : 933065FR
	Flexima 3S URO	635 ml	Réf : 934055FR	
	Poche de stomie videangeable avec bouchon pour couplage mécanique avec anneau flottant.	620 ml		Réf : 934065FR
	Boîte de 30			

LES SUPPORTS

Coloplast		∅	50	70	
	Sensura Mio Flex Support Standard	✂ 10-48 mm	Réf : 105610		
	Boîte de 10	✂ 10-68 mm		Réf : 105710	
	Sensura Mio convex Fit Flex Support convexe	✂ 15-30 mm	Réf : 169830		
	Boîte de 5	✂ 15-53 mm		Réf : 169950	
			60	70	
	Sensura Mio Click Support	✂ 10-55 mm	Réf : 105220		
	Boîte de 10	✂ 10-65 mm		Réf : 105310	
	Sensura Mio Convex Fit Click Support convexe	✂ 15-40 mm	Réf : 165690		
		✂ 15-53 mm		Réf : 165750	
		Convexe profond			
		✂ 15-40 mm	Réf : 165870		
		✂ 15-53 mm			Réf : 165950

 Hollister		Référence	Ø pré-découpage	Ø Anneaux
	Conform 2 CERAPLUS. Supports convexes souples avec renforts adhésifs. Boîte de 5.	14A00	 13-25 mm	45 mm
		15A00	 13-38 mm	55 mm
		17A00	 13-51 mm	70 mm
	Conform 2 CERAPLUS. Supports plans avec renforts adhésifs. Boîte de 5	14900	 13-30 mm	45 mm
		15900	 13-40 mm	55 mm
		17900	 13-55 mm	70 mm

 B BRAUN		Référence	Ø pré-découpage	Ø Anneaux
	Flexima 3S Plan Protecteur cutané total en forme de fleur . Anneau flottant. Boîte de 10	936515FR	 15-40 mm	55 mm
		936615FR	 15-50 mm	65 mm
	Flexima 3S Convexe Protecteur cutané total en forme de fleur. Convexité de 6mm de profondeur. Boîte de 5.	937515FR	 15-36 mm	55 mm
		937615FR	 15-46 mm	65 mm


GAMMES D'ACCESSOIRES

Prévenir des fuites

Anneau modelable Brava




Anneau pour prévenir les fuites. Création d'un joint d'étanchéité en prévention des fuites. Simple à manipuler et à modeler.

	Référence		Conditionnement
	120426	Epaisseur: 4.2 mm Diamètre: 18 mm	Boîte de 10

Brava Support Plus




Un renfort périphérique pour les patients stomisés présentant une morphologie péristomiale irrégulière. Prévention du décollement prématuré du support. Seconde peau extensible qui s'adapte aux mouvements du corps.

	Référence		Conditionnement
	120740	Forme Droite	Boîte de 20
	120760	Forme XL	Boîte de 20

Pâte en tube Brava sans alcool



Une protection contre les effluents. Formulation sans alcool : ne pique pas et respecte la peau. Comblement des plis et creux formés par la peau pour une bonne étanchéité péristomiale.

	Référence		Conditionnement
	120501	60 g	À l'unité

Ceinture Mio Brava



Conçue pour un appareillage avec la poche sensura Mio. Discrétion et souplesse pour plus de confort au port. 4 encoches pour une sécurité supplémentaire.


	Référence		Conditionnement
	004230	Standard 100 cm (possibilité XL 155 cm)	À l'unité

Protéger la peau

Spray de protection cutanée Brava




Un film protecteur qui ne pique pas et une solution destinée à protéger la peau saine des effluents et des adhésifs. Film protecteur contre les effluents, n'altère pas l'adhésivité du support appliqué par la suite.

	Référence		Conditionnement
	120101	Spray 50 ml	À l'unité

Poudre Brava




Une poudre pour prendre soin de la peau péristomiale. Utilisation sur le pourtour de la stomie. Conçue pour maintenir la peau sèche en absorbant l'humidité de la peau saine.

	Référence		Conditionnement
	019075	25 g	À l'unité

Adapt pâte






Utilisée pour **combler les irrégularités péristomiales** de façon à créer une surface plus plane et éviter que les substances ne passent sous le support ce qui peut engendrer des fuites.

	Référence		Conditionnement
	79300	60 g	À l'unité

Adapt anneaux protecteurs standards



A base de céramique pour **maintenir la peau péristomiale en bonne santé** en renforçant les défenses naturelles de la peau et en maintenant l'hydratation. Utilisés **pour combler les irrégularités péristomiales** de façon à créer une surface plus plane et éviter que les substances ne passent sous le support ce qui peut engendrer des fuites.

	Référence	∅ Diamètre	Épaisseur	Conditionnement
	8805	48 mm	4.45 mm	Boîte de 10
	8815	48 mm	2.3 mm (SLIM)	Boîte de 10
	7806	98 mm	2.3 mm	Boîte de 10

Adapt poudre




Absorbe l'humidité de la peau péristomiale, ce qui permet une meilleure adhérence du support et facilite la cicatrisation de la peau. La peau présentant des lésions ou des irritations doit être examinée par un professionnel de la santé.

	Référence		Conditionnement
	7906	28.3 g	À l'unité

Adapt spray médical pour retrait adhésif



A base de silicone, il permet de **faciliter le retrait du protecteur cutané et des résidus adhésifs sur la peau**. Il ne provoque ni sensation de froid ni picotement, même sur peau lésée.


	Référence		Conditionnement
	7737	50 ml	À l'unité

Faciliter le quotidien

Dosette de deo-lubrifiant



Neutralise les odeurs. **Action lubrifiante pour permettre aux effluents de glisser au fond de la poche** et éviter la stagnation au niveau de la stomie. Facilite la vidange de la poche.

	Référence		Conditionnement
	120600	Dosette 7.5 ml	Boîte de 20

Autre accessoire

Adapt ceinture



Cette ceinture élastique peut être utilisée avec des poches dotées d'oeillets. C'est à dire toutes les poches Conform 2. Elle donne confiance **car maintient l'appareillage plaqué sur l'abdomen**.

	Référence		Conditionnement
	7300	58 à 109 cm	À l'unité

QUAND LE SONDAGE EST IL NÉCESSAIRE

La rétention urinaire est l'incapacité à vider entièrement ou partiellement sa vessie, il s'agit de problèmes urinaires plus ou moins fréquent. Cela touche aussi bien les hommes que les femmes. Les symptômes peuvent être : une incapacité à uriner, une gêne, un besoin urgent d'uriner mais un jet très faible, des fuites causées par une incontinence par regorgement, un gonflement de la partie inférieure de l'abdomen,...

La rétention urinaire peut être dû :

- ❖ à des causes neurologiques : comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, une lésion de la moelle épinière qui peuvent perturber la transmission des signaux entre le cerveau et la vessie, ce qui entraîne un dysfonctionnement du système urinaire.
- ❖ à une obstruction sur les voies urinaires.
- ❖ à un manque de tonus du muscle vésical.

L'accumulation d'urine dans la vessie peut entraîner des infections urinaires et des reflux. L'urine remonte alors vers les reins et les endommage.

Des solutions existent pour permettre d'évacuer l'urine contenue dans la vessie: le sondage urinaire. Il peut être permanent (sondage à demeure) ou intermittent: c'est un sondage qui est répété plusieurs fois par jour et retiré jusqu'à ce que la vessie soit vide.

Plus d'information :
Coloplast.fr

LES SONDÉS

SpeediCath Compact Set



Comprend une sonde et une poche pré-connectée. Elle convient particulièrement à tous ceux qui recherchent une solution offrant **une liberté de sondage. Discrète et pratique**, à utiliser au quotidien ou en alternative à votre sonde habituelle hors de votre domicile.

	Référence	CH	Conditionnement
	285241	14 Nelaton 9 cm Poche de 750 ml	Boîte de 20
	284221	12/18 Nelaton 30 cm Poche de 750 ml	Boîte de 20

SpeediCath Compact Eve




Sa forme triangulaire permet une meilleure prise en main et facilite la manipulation. Cette sonde **s'ouvre et se referme hermétiquement en un seul geste**. Esthétique et féminine, elle s'intégrera dans votre quotidien.

	Référence	CH	Conditionnement
	281140	14 Nelaton 9 cm	Boîte de 30

SpeediCath Flex



Une sonde souple dotée d'une gaine de protection sèche et hermétique et d'une extrémité olivaire. **Conçue pour suivre les courbures de l'urètre, quelle que soit l'anatomie.**

	Référence	CH	Conditionnement
	289140	14 Nelaton 40 cm Format poche	Boîte de 30
	289240	14 Nelaton 40 cm Format standard	Boîte de 30

Infyna Sonde simple





Une sonde qui offre un **équilibre entre flexibilité et rigidité pour un sondage en toute simplicité.**

	Référence	CH	Conditionnement
	88141	 14 Nelaton 17 cm	Boîte de 30

Infyna Plus Set de sondage






Un set de sondage pour se **sonder facilement en toutes circonstances** grâce à sa poche de recueil pré-connectée de 1000 ml.

	Référence	CH/Volume	Conditionnement
	86141	 14 Nelaton 17 cm Poche de recueil 1000 ml	Boîte de 30

VaPro



Pour **sondage intermittent**, la sonde associe facilité d'utilisation et protection pour que vous puissiez contrôler votre dispositif.



	Référence	CH	Conditionnement
	72122	 12 Nelaton 20 cm	Boîte de 30
	72144	 14 Nelaton 40 cm	Boîte de 30

Les sondes VaPro



Les sondes offrent une **protection 100% sans contact avec un embout et une gaine de protection**. Une poche est intégrée pour un sondage au domicile ou à l'extérieur. Pas besoin d'aller aux toilettes ou d'avoir un récipient à côté.

VAPRO PLUS			
	Référence	CH	Conditionnement
	74122	 12 Nelaton 20 cm	Boîte de 30
	74144	 14 Nelaton 40 cm	Boîte de 30



VAPRO POCKET			
	Référence	CH/Volume	Conditionnement
	70144	 14 Nelaton 40 cm Poche de recueil 1000 ml	Boîte de 30


VAPRO PLUS POCKET			
	Référence	CH	Conditionnement
	71122	 12 Nelaton 20 cm Poche de recueil 1000 ml	Boîte de 30





Actreen Mini

B | BRAUN

Actreen Mini est une sonde urinaire pour **sondage intermittent pré-lubrifiée et prête à l'emploi**.

ACTREEN MINI CATH			
	Référence	CH	Conditionnement
	228014R	 14 Nelaton 9 cm	Boîte de 30

ACTREEN MINI SET			
	Référence	CH	Conditionnement
	239012R	 12 Nelaton 9 cm	Boîte de 30

ACTREEN HI LITE CATH			
	Référence	CH	Conditionnement
	238214R	 14 Nelaton 41cm	Boîte de 30
	238114R	 14 Tiemann 41cm	Boîte de 30
	238314R	 14 Nelaton 20 cm	Boîte de 30

Actreen Glys Set

B | BRAUN




Kit de sondage stérile prêt à l'emploi comprenant une sonde de pré-lubrifiée, une poche de recueil de 1000 ml en système clos avec valve anti-reflux.

	Référence	CH	Conditionnement
	226114R	 14 Tiemann 50 cm	Boîte de 30

Actreen Hi-Lite Set

B | BRAUN




Actreen Hi-Lite Set est un **set de sondage urinaire stérile, directement utilisable sans préparation**. Sa poche de recueil de 1L vous permet de vous sonder sans vous préoccuper de gérer vos urines.

	Référence	CH	Conditionnement
	242214R	 14 Nelaton 37 cm	Boîte de 30
	242114R	 14 Tiemann 37 cm	Boîte de 30

Rüsch Aquaflate Glycérine - 2 voies

Teleflex®



Le cathéter à ballonnet est transparent et **possède une valve pour le raccordement à une seringue pour le gonflage du ballonnet**. Une seringue pré-remplie stérile (glycérine 10%) pour le gonflage du ballonnet est incluse en raison de la pointe radio-opaque du cathéter et de la bande de contraste radiographique le long de la tige.

	Référence	CH / Longueur	Conditionnement
	178001-000140	 CH : 14 Long. : 20 cm	Boîte de 5
	850081-000180	 CH : 18 Long. : 40 cm	Boîte de 5

Rüsch Aquaflate Glycérine - Béquillée

Teleflex®



Les sondes ont été spécialement conçues pour offrir au patient un **maximum de sécurité et de confort pour un drainage à long terme**. La sonde 100% en silicone et la seringue pré-remplie d'une solution stérile de glycérine constituent la combinaison parfaite.




	Référence	CH / Longueur	Conditionnement
	850084-000180	 CH : 18 Long. : 40 cm	Boîte de 5


ETUIS PENIENS

L'incontinence urinaire chez les hommes est la perte involontaire d'urine qui survient quand le muscle qui maintient le col de la vessie fermé (sphincter) n'est plus suffisamment tonique.

L'incontinence peut être causé par : une ablation de la prostate, des infections ou des traitements médicamenteux, des pathologies, des rétrécissements urétraux, des dysfonctionnements du sphincter vésical, des traumatismes pelviens, des lésions médullaires, une sclérose en plaques, des troubles neurologiques. Les circonstances permettront de déterminer le type d'incontinence.



	Référence	CH	
	 Penilex silicone PA5030	30 Normal 8.1 cm	Boîte de 30
	Conveen security 052300	30 Version standard 8.2 cm	Boîte de 30






	Référence	CH	
	 In View Standard 97236	36 Pour les verges de 4 cm et plus L. étui : 12.5 cm L. adhésif : 4.5 cm	Boîte de 30
	 InView Special 97136	36 Pour les verges de 1 à 4cm L. étui : 10 cm L. adhésif : 4 cm	Boîte de 30

	Référence	CH	
	 Urimed Vision IH2536	36 L. étui : 7.5 cm L. adhésif : 4.5 cm	Boîte de 30
	 Urimed Vision Ultra IH3536	36 L. étui : 7.5 cm L. adhésif : 4.5 cm	Boîte de 30

LES PochES URINAIRES

 Coloplast	Référence		Longueur / Volume	Conditionnement
	210190	Poche de jambe stérile Conveen Triform Poche de recueil urinaire stérile.	0.5 L tub. Crénelée 50 cm	Boîte de 10
	050620	Poche non stérile Utilisation pour le jour et la nuit. Système de vidange.	1,5 L tub. lisse 90 cm ajustable	Boîte de 30
	213460	Poche non stérile Utilisation pour le jour et la nuit. Système de vidange.	2 L tub. crénelée 140 cm ajustable	Boîte de 30
	105850	Sensura Mio 1 pièce vidangeable Textile Maxi	550 ml Diamètre 30 Découpe 30-45	Boîte de 30


 BRAUN	Référence		Volume/Longueur	Conditionnement
	Urimed Bag 2 L 28300R	Poche de recueil urinaire graduée, possédant : une valve anti-reflux, une tubulure intégrée de 120 cm, un bouchon de vidange.	Capacité : 2 L Tubulure : 120 cm	Boîte de 30

 Hollister	Référence		Longueur/Volume	Conditionnement
	9432 Poche de nuit Hollister 2 000 ml	Poche de recueil. Jetable avec robinet de vidange ergonomique en croix.	2 000 ml Tubulure 100 cm	Boîte de 30
	9650 Poche de nuit Hollister 2000 ml plus	Poche de recueil dotée d'un film anti-odeur et d'un robinet de vidange ergonomique à bascule.	2 000 ml Tubulure 120 cm	Boîte de 10
	5550 Poche Hollister	Cette poche de nuit se raccorde directement à la poche vidangeable Hollister.	2 000 ml	Boîte de 10
	9624 9632	Poche de jambe stérile et sous emballage individuel. Elle se fixe sur la jambe grâce à des lanières ou un filet de confort.	500 ml 800 ml	Boîte de 10

Collecteur d'urine

Teleflex®


Fourni **avec une chambre compte-gouttes ventilée. Valve anti-reflux intégrée conçue pour interrompre le flux d'urine.** Le connecteur universel avec capuchon de protection et arêtes de connecteur spécialement conçues permet une connexion sécurisée avec l'entonnoir du cathéter. Le port de prélèvement d'urine sans aiguille permet le prélèvement d'urine avec une seringue. Le sac est fixé à l'aide des options de crochet ou de cordon.

	Référence	Volume/Longueur	Conditionnement
	673044-000000	2 000 ml 120 cm	Boîte de 20

Poche de lit

Teleflex®


Nos poches de recueil d'urine de lit offrent aux utilisateurs une sécurité et un **confort optimaux jour et nuit**. Une valve anti-reflux prévenant tout reflux d'urine et minimisant ainsi le risque d'infection. Graduations claires en ml aidant l'utilisateur à contrôler le volume urinaire et facilitant ainsi l'auto-gestion. Sans latex. Usage unique.

	Référence	Volume/Longueur	Conditionnement
	850405-000000 Non stérile - sans support	2 000 ml 90 cm	Boîte de 10
	850406-000000 Non stérile - avec support	2 000 ml 90 cm	Boîte de 30
850419-000000 Stérile (pas de code LPP)	2 000 ml 120 cm	Boîte de 75	

Poche de jambe stérile

Teleflex®

Toutes les **poches de jambe offrent sécurité et confort**. La valve anti-reflux empêchant tout reflux d'urine minimise le risque d'infection. Graduations claires en ml facilitant le contrôle de la vidange. Sans latex. Usage unique.


	Référence	Volume/Longueur	Conditionnement
	850339-000000	750 ml 10 cm	Boîte de 10
850341-000000	750 ml 30 cm	Boîte de 10	

LES ACCESSOIRES

Conveen Protact




Protège la peau de l'urine et de l'incontinence fécale légère.

	Référence		Conditionnement	Prix
	651001	100 g	À l'unité	5.50 €

Conveen Prep



Compresse à utiliser après la toilette quotidienne du pénis. Les lingettes laisseront un film protecteur sur la peau, pour une adhérence renforcée de l'étui.

	Référence	Conditionnement	Prix
	620420	Boîte de 54	15.25 €

Lingette Conveen




Pour une **toilette de la peau et des muqueuses.**

	Référence	Conditionnement	Prix
	289970	Sachet de 10	15.60 €

Spray retrait d'adhésif




Facilite le retrait des étuis péniens. N'interfère pas avec l'adhésivité de l'étui. À base de silicone, la solution ne pique pas et sèche en quelques secondes.

	Référence		Conditionnement
	120101	50 ml	À l'unité

Filet de confort



Enfilade comme une chaussette, il se place facilement sur le mollet. La poche de jambe se glisse dans la poche de nuit.

	Référence	Conditionnement
	9612	Sachet de 1 filet

Lanières



La large lanière en tissu pour poche de jambe Hollister maintient confortablement la poche en place.

	Référence	Conditionnement
	9625	Sachet de 1 paire



Autonomie

Changez-vous la vie !



Livraison nationale
sous **24h-48h**



Astreinte
24h/24 7j/7

simsante.fr

Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site internet.



04 69 84 22 90